



**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ДРАЙВ»
ТАА «ДРАЙВ»**

пр. Незалежнасці, д. 185, памяшканне 16,
220125, г. Мінск
тэл. (+375 17) 374 00 17,
www.drivems.by, e-mail: drive@drive-by.net
УНП 100177569, АКПА 14731753
Р/р ВУ30 ВПСБ 3012 0099 0001 3933 0000
у ААТ «Сбер Банк»,
б-р Мулявіна, 6, 220005, г. Мінск,
БІК ВПСБВУ2Х

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРАЙВ»
ООО «ДРАЙВ»**

пр. Независимости, д. 185, помещение 16,
220125, г. Минск
тел. (+375 17) 374 00 17,
www.drivems.by, e-mail: drive@drive-by.net
УНП 100177569, ОКПО 14731753
Р/с ВУ30 ВПСБ 3012 0099 0001 3933 0000
в ОАО «Сбер Банк»,
б-р Мулявина, 6, 220005, г. Минск,
БИК ВПСБВУ2Х

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ КАБИНЕТА
К МОНТАЖУ РЕНТГЕНОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(КОСМОС 535, КОСМОС УНИВЕРСАЛ)**

Наименование ЛПУ, кабинет _____

Дата _____ 202__ г.

Готовность кабинета

1. Наличие утвержденного проекта кабинета _____

2. Законченность работ:

2.1 Строительных _____

2.2 Готовность пола _____

2.3 Готовность потолка _____

2.4 Готовность стен _____

2.5 Готовность сантехнических работ _____

3 Готовность электромонтажных работ, в том числе:

3.1 Наличие и подключение коммутационного устройства (рубильника), наличие сети ~380 В (документальное подтверждение) по постоянной схеме подключения (пятипроводная система TN-S)

3.2 Наличие силового кабеля 5х16 (4-го класса гибкости и выше)

(монтажный запас 2 м.)

Образец жил кабеля ->



3.3 Установка розеток (наличие сдвоенных розеток с заземляющим контактом в комнате управления, возле пульта управления, возле генератора) _____

3.4 Установка розеток для дополнительного оборудования (CR системы, мониторов, лазерного принтера и т.д) согласно плану ООО «Драйв»

3.3 Установка светильников

4 Наличие локальной вычислительной сети между кабинетами: процедурной, кабинетом врача, пультовой, кабинетами с рабочими станциями

5 Чистота помещения (влажная уборка)

6 Отсутствие посторонних предметов, мешающих монтажу

7 Наличие шины заземления с болтами

8 Наличие протокола проверки заземляющего устройства

9 Фундамент

9.1 Соответствие расположения и размера фундамента с распределительной рамой проекту и пояснительной записке ООО «Драйв»

9.2 Поверхность пола в месте установки рамы с аппаратом : (ровная горизонтальная поверхность, выровненная по уровню, закрытая паркетом)

10 Кабельные каналы (короба)

10.1 Соответствие расположения и размера кабельных каналов (коробов) проекту и пояснительной записке ООО «Драйв»

10.2 Чистота каналов, отсутствие посторонних предметов

10.3 Наличие и аккуратность исполнения съемных крышек, крышек, наличие отверстий для выхода кабелей

10.4 Наличие кабельных протяжек в кабельных каналах

11 Наличие защитного стекла, установка рамы под защитное стекло

(если применимо)

12 Наличие проводов для фонаря (!!!с лампой накаливания!!!) над дверью возле места установки генератора, свободные концы не менее 1,5 м.

Произвести прозвонку кабеля

13 Наличие проводов для датчика двери возле места установки генератора, свободные концы не менее 1,5 м. _____

14 Наличие отверстия в стене между процедурной и комнатой управления _____

15 Наличие стола 1500 x 800 для пультов и мониторов в комнате управления _____

16 Доставка оборудования на один уровень с помещением _____

17 Температурный режим в кабинете (В кабинете должен быть обеспечен нормальный температурный режим для проведения работ не менее 17 С°)

Примечание: В случаях, когда в протоколе отображены несущественные недостатки, которые будут устраняться после визита представителей ООО «Драйв», необходимо!!! сделать фото всех устраненных замечаний, а так же панорамное фото кабинета и отправить на e-mail service@drive-by.net

ВЫВОД: Помещение к монтажу рентгеновского оборудования

(готово, не готово)

Проверку произвели:
Представитель ООО «Драйв» _____ / _____ /

В присутствии представителя Заказчика _____ / _____ /

В присутствии представителя Подрядчика _____ / _____ /

С протоколом ознакомлен:
Главный врач _____ / _____ /