

Перв. примен.

Спроб. №


Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № посл.

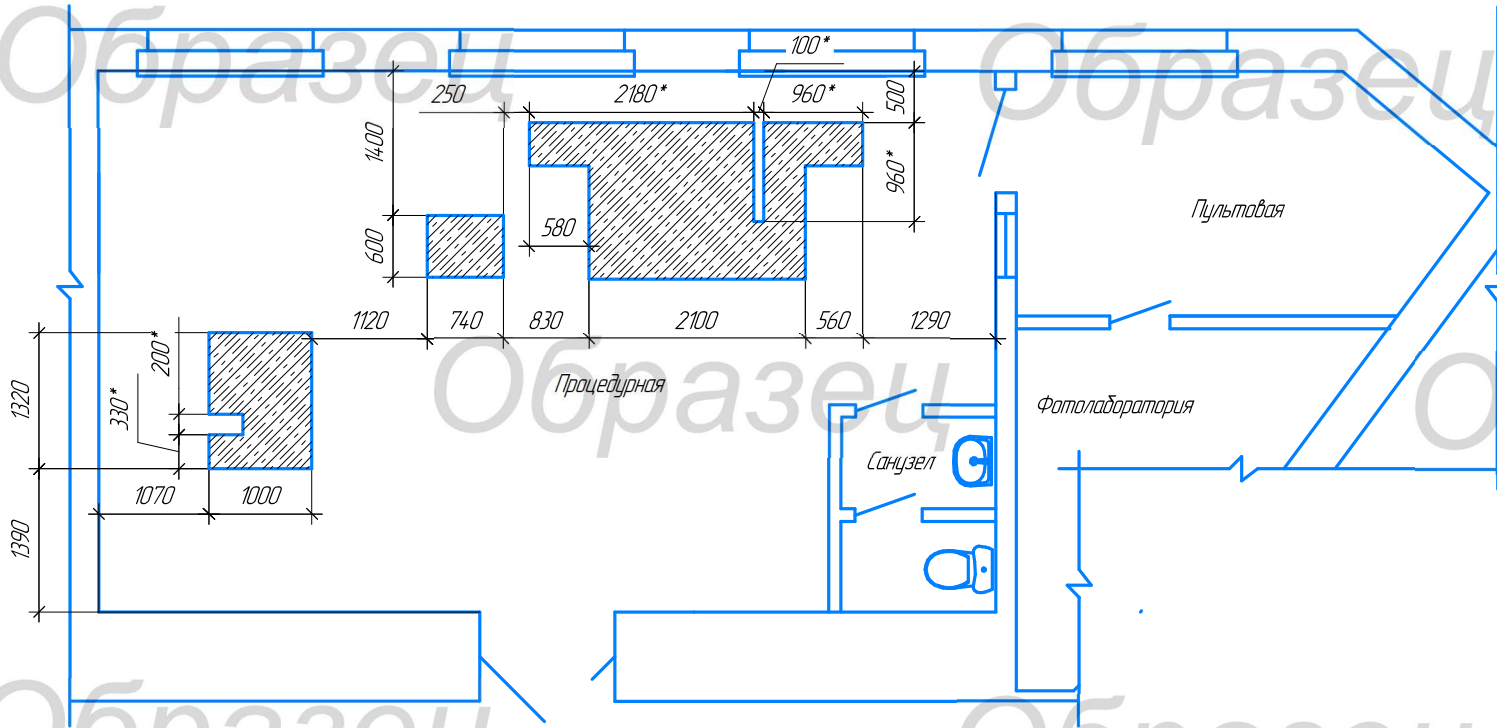

1. Фундамент под стол снимков со штативом (вес стола снимков со штативом 304 кг)
2. Фундамент под стойку снимков (вес стойки снимков 145 кг)
3. Фундамент под стол-штатив поворотный (вес с пациентом 1230 кг)
3. Для заливки использовать бетон марки не ниже С20/25.
4. Поверхности фундаментов должны быть выровнены по уровню. Максимальные отклонения от горизонтали 2 мм на метр. Суммарная погрешность по всей длине фундамента не более 4 мм.
5. Фундаменты не должны выступать над уровнем чистого пола.
6. Для выравнивания поверхности фундамента допускается использовать финишный самонивелир.
7. Поверхность фундамента закрыть покрытием пола.
8. Крепление штативных устройств к фундаментам осуществляется анкерными болтами (в составе комплекта поставки).
9. Строго выдерживать размеры со звездочкой.

				УЗ "Городская поликлиника №6" г. Гродно			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат рентгеновский диагностический стационарный Космос Универсал			
Разраб.	Резанович		10.21				
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.				Схема расположения фундаментов			
Утв.							
				Лит.	Масса	Масштаб	
				Лист	3	Листов	7
				1:50			

Копировал

Формат А3